

Mini Apex

Localizador Apical

E-perfect®
www.dendist.net

Mini Apex es un producto auxiliar para el tratamiento de conductos radiculares, que ayuda a los dentistas a realizar mejor las intervenciones midiendo la longitud dinámica desde el instrumento hasta el ápice.

21g
Peso

97%

Precisión de la
medición

180mAh

Capacidad de la
batería

7days

Duración de la
Batería



Invention patent NO.

ZL201810957570.8

A root canal length measurement method and instrument

Utility model patent NO.

ZL201810931393.6

A method and device for calibrating the root canal length measurement

Portátil
Preciso
Receptivo
Adaptable

INFORMACIÓN

MODELO

Mini Apex (Localizador apical)

DIMENSIONES

52.6*34.2*14.5mm±1mm

PESO

21g

FUENTE DE PODER

DC 3.7V/180mAh Batería de litio

ADAPTADOR - SALIDA

DC 5V, 2A


ADAPTADOR - ENTRADA

AC 100-240V 50/60Hz

POTENCIA

10VA


INTERFAZ DE USUARIO

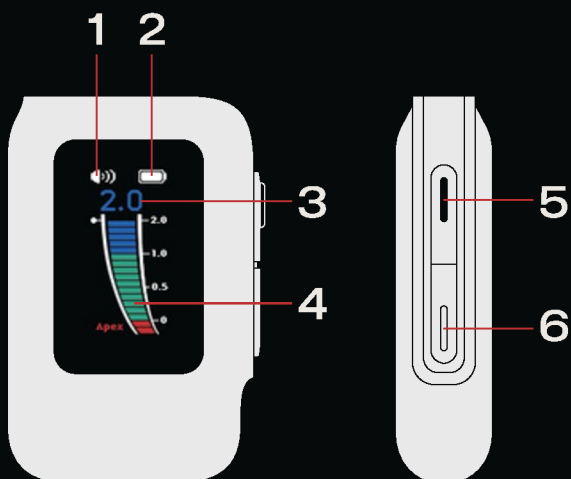


1. Volumen
2. Batería
3. Longitud hasta el vértice
4. Visualización dinámica de la longitud hasta el vértice
5. Botón de encendido/+
6. Botón de volumen/-

INSTRUCCIONES DE USO


1. Carga

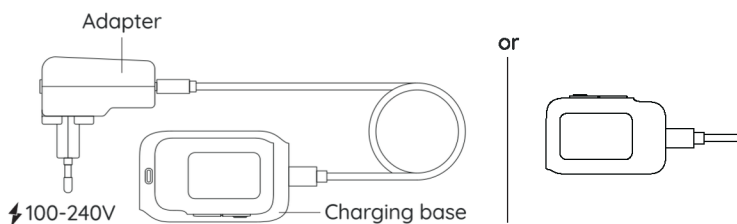


2. Ensamble

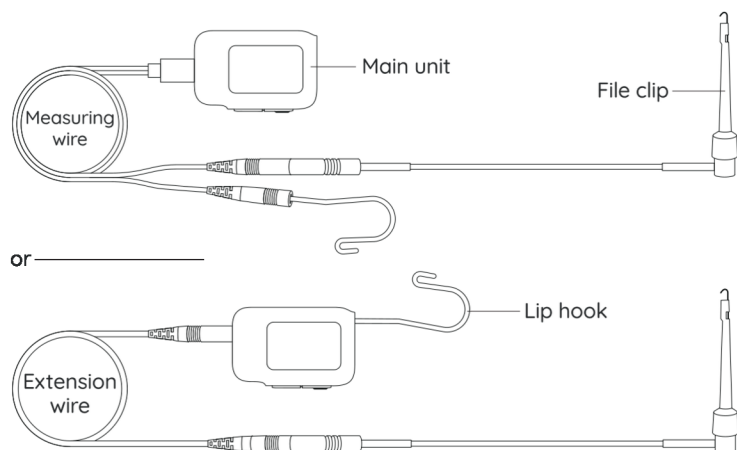


3. Testeo

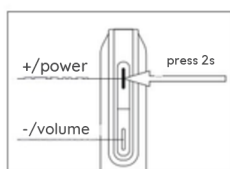

Enciende el dispositivo

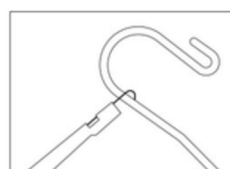


Cortocircuita la parte metálica.

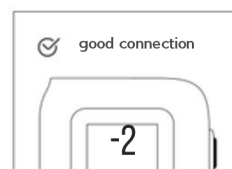


La pantalla muestra "-2", lo que indica una buena conexión.


4. Operación

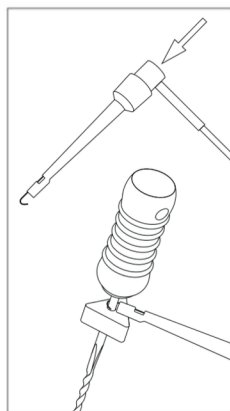

Presione el cabezal del clip de archivo y conéctelo al archivo que utiliza.

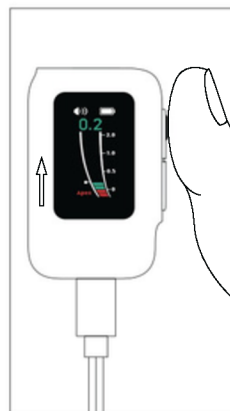

Pulsa los botones "+" y "-" para establecer el punto de referencia.

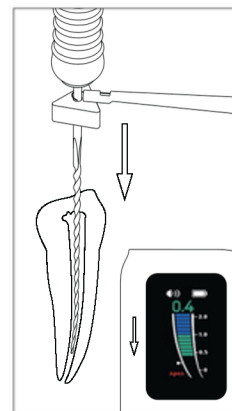

Los datos cambian a medida que la lima se desliza dentro del conducto radicular